



Fegura® Sil

GINGI

Wskazania

Wysoko elastyczny silikon addycyjny, utwardzany, przeznaczony do wykonywania masek dziąsłowych do modeli dzielonych.

Instrukcja użycia

1. Przygotuj model gipsowy.
2. Przed segmentacją, wykonaj wycisk przy pomocy silikonu Fegura® Sil Putty. Powiel również zęby sąsiednie przy obszarze maski dziąsłowej.
3. Podziel model gipsowy i opracuj słupki.
4. Wywierć kanał wtrysku i sprawdź dopasowanie wycisku silikonowego do modelu.
5. Nanieś izolator Fegura® Sil Gingi na wewnętrzną stronę silikonowego wycisku i załóż wycisk na model.
6. Umieść pojemnik silikonu Fegura® Sil Gingi w pistolecie, załóż mieszalnik i końcówkę dozującą. Jeśli to konieczne, skróć trochę końcówkę przy pomocy noża, tak aby dopasowanie końcówki i kanału wtryskowego było idealne. Uwaga: Po zdjęciu uszczelki załóż niezwłocznie mieszalnik i rozpocznij przetwarzanie. Pozostaw mieszalnik na pojemniku do następnego użycia.
7. Wtryśnij powoli Fegura® Sil Gingi do otworu i zostaw na 6 - 10 minut do związania.
8. Ostrożnie usuń wycisk silikonowy, odetnij kanał wtryskowy i nadmiar silikonu.

Informacja o zagrożeniach

Unikać kontaktu nie spolimeryzowanego materiału z oczami. Fegura® Sil Gingi może działać drażniąco. W przypadku kontaktu z oczami, przemyć dużą ilością wody, w przypadku utrzymywania się podrażnienia należy skonsultować się z lekarzem. W przypadku kontaktu ze skórą przemyć wodą z detergentem.

Przechowywanie

Temperatura przechowywania: 5-25 °C

Data przydatności: sprawdź datę na opakowaniu

Opakowania/ Akcesoria

2010 Fegura® Sil Gingi – Zestaw

2011 Fegura® Sil Gingi – Opakowanie uzupełniające 2x52 g., 12 mieszalników + 12 końcówek

2012 Fegura® Sil Gingi – Izolator 15 ml.

2013 Fegura® Sil Gingi – 40 mieszalników i 40 końcówek

2014 Fegura® Sil Gingi – Pistolet

Materiał jest przeznaczony do użycia w laboratoriach dentystycznych i musi być stosowany zgodnie z instrukcją. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niezgodnego z instrukcją. Użytkownik jest zobowiązany do samodzielnego sprawdzenia czy produkt może zostać użyty w określonym celu, zwłaszcza jeśli nie jest to wymienione w instrukcji.

Producent: Feguramed GmbH, Jahnstr.2, D-74722 Buchen-Hettingen

Dystrybutor: *HOLTRADE Eksport-Import, ul. Kościuszki 51, 05-500 Piaseczno,
tel. 22 750 40 70, www.holtrade.pl*